


BURANE

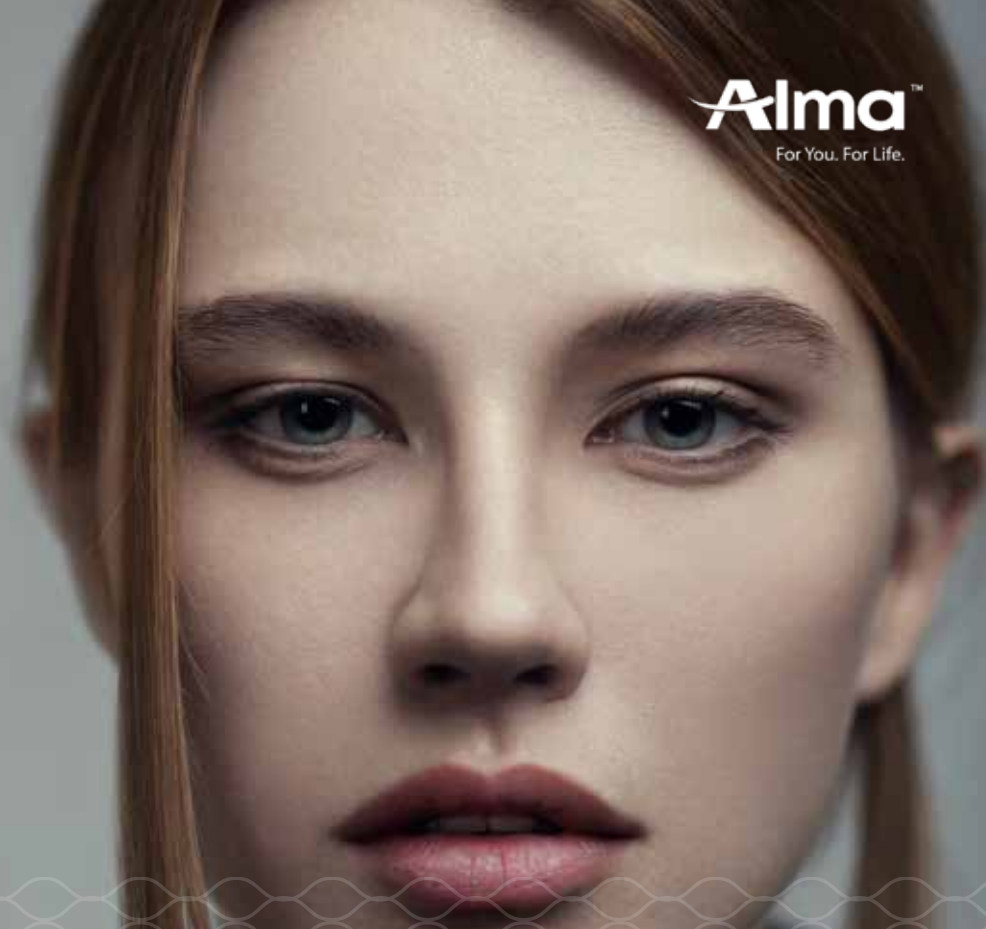

**HAUTVERJÜNGUNG,**  
NARBENGLÄTTUNG UND  
**ENTFERNUNG** VON GUTARTIGEN  
**HAUTVERÄNDERUNGEN**  
MIT DEM LASER


**Alma**<sup>TM</sup>  
For You. For Life.



**AESTHETIC  
PRECISION**

**DAS UNIVERSELLE ER:YAG-LASER-  
SYSTEM FÜR KLASSISCHE  
ÄSTHETISCHE ANWENDUNGEN**

- GLÄTTEN VON FALTEN & NARBEN
- ENTFERNEN VON GUTARTIGEN  
HAUTVERÄNDERUNGEN
- SCHRITTWEISES ABTRAGEN
- SCHONENDES VERFAHREN
- SCHNELLE HEILUNG



## Ablation mit dem Erbiumlaser - für ein glattes, ebenmäßiges Hautbild

Glatte, makellose Haut ist ein Symbol für Jugend und Vitalität. Mit steigendem Alter lassen sich erste Zeichen der Hautalterung jedoch oft nicht mehr verbergen. Sonneneinstrahlung und andere Faktoren können den natürlichen Alterungsprozess der Haut noch beschleunigen und lassen erste Falten entstehen.

Andererseits sind aber manchmal gerade die Hinterlassenschaften der Jugend – wie z. B. Aknenarben – ein Problem. Mit einer Laserbehandlung können heute sowohl Falten als auch Narben sanft geglättet werden.

Auch viele gutartige Hautveränderungen wie Warzen oder Xanthelasma lassen sich mit dem Laser sanft, aber gezielt und wirksam entfernen.

## Behandlungsgebiete

### ∞ Narben:

Mit dem Laser können hervortretende und nach innen gewölbte Narben der normalen Hautstruktur angeglichen werden. Durch die thermische Wirkung des Lasers lassen sich störende Begleiterscheinungen von Narben, wie z.B. Jucken, Schmerzen und Spannungsgefühl, deutlich reduzieren oder beseitigen.

---

### ∞ Falten:


Viele Falten lassen sich mit dem Laser sichtbar glätten. Insbesondere kleine Fältchen um den Mund oder „Krähenfüße“ um die Augen eignen sich sehr gut für die Laserbehandlung. Es stehen verschiedene Behandlungsansätze zur Verfügung - eine rein thermische Wirkung auf das Gewebe, ein Abtragen der obersten Hautschichten oder eine fraktionierte Behandlung - Ihr Arzt wird Sie gerne beraten.

---

### ∞ Gutartige Hautveränderungen:

Zahlreiche störende Hautveränderungen können durch schrittweises Abtragen mit dem Laser schnell und hautschonend entfernt werden. Dazu zählen Alterswarzen, Keratosen, Fibrome, Syringome, Altersflecken und viele weitere oberflächliche erhabene pigmentierte und nicht-pigmentierte Läsionen.


## Schnelle Behandlung. Beeindruckende Ergebnisse.

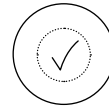

### *Bewährtes Multitalent für die Ästhetik*

Optimale Wellenlänge zur Ablation, vielseitig einsetzbar, geringe Nebenwirkungen.

---

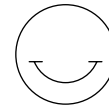

### *Sicher, schnell und Präzise*

Verschiedene Spotgrößen für ein exaktes Arbeiten und gezieltes Abtragen von störenden Hautveränderungen. Hautschonendes Verfahren.


---



### *Schnell*

Die Behandlung ist schnell durchzuführen, Ergebnisse sind sofort sichtbar.

---

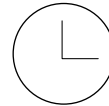

### *Keine Ausfallzeit*

Sie können direkt nach der Behandlung ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen.

## Behandlungsergebnis mit BURANE: oberflächliche Hautveränderungen



**BURANE im Ablationsmodus.**  
Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. Kaufmann, Frankfurt




**BURANE im Ablationsmodus, Entfernung von Xanthelasma**  
Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. Kaufmann, Frankfurt

## Behandlungsergebnisse mit BURANE XL: Falten und Aknenarben



**BURANE im Kombinationsmodus.**  
Ergebnis nach einer Behandlung im Kombinationsmodus.

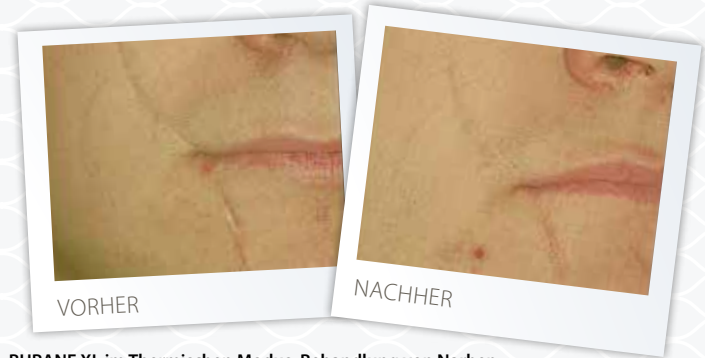

**BURANE XL im Thermischen Modus, Behandlung von Narben**  
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Kunzi-Rapp, Universitätsklinikum Ulm

# VOR UND NACH DER BEHANDLUNG WAS MÜSSEN SIE BEACHTEN?

## *Ungeeignet für gebräunte Haut*

Sonnen- und solariumgebräunte Haut eignet sich nicht für die Laserbehandlung.

## *Ausfallzeit*

Werden die oberen Hautschichten abgetragen, kommt es zu einer Rötung der Haut und Krustenbildung. Sie müssen mit ca. 10 Tagen für die Wundheilung rechnen.

Bei einer rein thermischen Behandlung entfällt in der Regel selbst diese kurze Abheilzeit und die Haut ist bereits am Tag nach der Behandlung frei von Rötungen.

## *Sonnenlicht meiden*

Vermeiden Sie nach der Behandlung direkte Sonnenbestrahlung (auch Solarium) für eine Dauer von ca. vier Wochen. Sollte dies unvermeidbar sein, muss der therapierte Bereich zumindest durch eine Sonnenschutzcreme mit möglichst hohem Lichtschutzfaktor abgedeckt werden.

## *Nachsorge*

Bis etwa vier Wochen nach der Laserbehandlung sollte eine starke Erwärmung der behandelten Hautpartien - beispielsweise durch einen Saunabesuch - vermieden werden. Zudem sollte nach der Behandlung im Falle einer Hautabtragung einige Tage Regenerationszeit eingeplant werden.

Die oben genannten Informationen zur Vor- und Nachsorge sind nicht vollständig für alle Behandlungen mit dem Laser BURANE und ersetzen nicht die persönliche Beratung und Aufklärung durch Ihre Ärztin / Ihren Arzt.



Alma Lasers ist ein führender Anbieter von Laser-, Licht-, Radiofrequenz- und Ultraschall-Technologien für Dermatologie, Ästhetik und Chirurgie. Als Patient profitieren Sie von sicheren und wirksamen Behandlungen mit modernsten, klinisch bewährten Systemen.

Sie interessieren sich für eine Behandlung mit dem Erbiumlaser?  
Sprechen Sie uns an - unser Praxisteam berät Sie gerne.

Patientenbroschüre BURANE, Art. Nr. 68181017

## Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102  
90411 Nürnberg, Deutschland  
Tel. + 49 911 / 89 11 29-0  
Fax + 49 911 / 89 11 29-99  
Email: [info@alma-lasers.de](mailto:info@alma-lasers.de)  
[www.alma-lasers.de](http://www.alma-lasers.de)

© 2018 Alma Lasers. Alle Rechte vorbehalten. Alma Lasers, das Firmenzeichen und BURANE / BURANE XL sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Alma Lasers, Ltd. In den USA und / oder anderen Ländern. Technische Änderungen vorbehalten.



FOLGEN SIE  
ALMA LASERS

